

セレクトチタンラウン研磨キット



届出番号 27B3X00077SE0005 一般医療機器(クラスI) 歯科技工用研削・研磨キット



チェアサイドでも簡単に
チタンラウンの艶出し研磨ができる！！

キット内容

セレクトテクノポリッシャー 2301	1枚※1
セレクトタイタンCP	1枚※1
セレクトタイタンCPS	1枚※1
セレクトマンドレルH50	3本※2
セレクトレザーサンドブラシ ハード	1本
セレブライト 70g	1個

※1※2：マンドレルH50を各研磨材に装着済み。
※口腔内では使用できません。必ず装着前にご使用ください。

HP用

標準価格

4,800円(税別)

使用手順

大きなキズ除去

大きなキズがある場合は、二酸化チタン粒子が練り込まれたセレクトテクノポリッシャーで除去し均します。

くもり除去

チタン研磨用に開発されたセレクトタイタンCP/CPSで全体を満遍なく研磨する。

艶出し

仕上げはセレクトレザーサンドブラシにセレブライトを塗布して艶を出します。

Sele-bright 70g/280g

セレブライト 70g/280g

チタン研磨用ルージュ。粘り気のある微細な粒子は、ブラシへ少量塗布し研磨することで素早く艶のある光沢面を得ることができます。



用途：
中間・仕上げ艶出し研磨

製品名	入数	標準価格
セレブライト70g	70g×1	1,800円
セレブライト280g	70g×4	6,200円

届出番号 27B2X00011000033 一般医療機器(クラスI) 歯科用研磨器材

Selec Titan CP/CPS

セレクトタイタンCP/CPS

チタン用に開発されたシリコンカーバイトを含ませた適度な硬さの合成樹脂により、チタンの研磨を容易にし、効率的に素早く研磨をおこなえます。

簡単 スピーディー



セレクトタイタンCP

セレクトタイタンCPS



チタン本来の輝きを取り戻す



HP用

用途：
中間研磨


製品名	直径	厚さ	入数	標準価格
セレクトタイタンCP	24mm	3mm	12個入	5,800円
セレクトタイタンCPS	22mm	2mm	12個入	2,000円

届出番号 27B3X00077SE0004 一般医療機器(クラスI) 歯科技工用アブリュブ研削器具

Selec Techno Polisher

セレクトテクノポリッシャー 2301/2302/2304

研磨粒子を練り込んだ弾力があるシリコンゴムは、切削力と研磨力とを兼ね備えているので、チタンなどの素材に対して発熱を抑えた研磨をおこなうことができます。

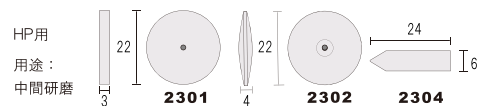

HP用
用途：
中間研磨

販売名	形状	入数	標準価格
セレクトテクノポリッシャー	2301	12個入	2,500円
	2302	100個入	15,800円
	2304		

届出番号 27B3X00077A80001 一般医療機器(クラスI) 歯科用ゴム製研磨材

Selec Leather-Sandwich Brush HARD/SOFT

セレクトレザーサンドブラシ ハード/ソフト

面部分の研磨に最適な革素材を軟性ブラシ素材で挟み込みました。短時間で磨き上げ艶を出すことができます。



HP用
用途：
仕上げ艶出し研磨

製品名	直径	入数	標準価格
セレクトレザーサンドブラシハード	22mm	12本入	3,300円
セレクトレザーサンドブラシソフト	22mm	12本入	3,300円

届出番号 27B3X00077WJ0002 一般医療機器(クラスI) 歯科用研磨器材

Selec Mandrel H50/H70 / Selec Mandrel SCREW

セレクトマンドレルH50/H70 セレクトマンドレルスクリュー

HP用マンドレル。ディスクやホイールのサイズによりサイズが異なる2種。砲弾型形状のものに最適なスクリュータイプがあります。

製品名	ヘッド直径	入数	標準価格
セレクトマンドレルH50	5mm	5本入	1,200円
		10本入	2,300円
セレクトマンドレルH70	7mm	5本入	2,000円
		10本入	3,300円

届出番号 27B3X00077BK0005 一般医療機器(クラスI) 歯科用マンドレル

マンドレルスクリューはテクノポリッシャー 2304に最適です。

製品名	スクリュー部	入数	標準価格
セレクトマンドレルスクリュー	15mm	3本入	1,600円

届出番号 27B3X00077SM0006 一般医療機器(クラスI) 歯科用マンドレル

※製品改良のため、仕様・外観を変更することがあります。※標準価格には消費税は含まれておりません。別途消費税を頂戴致します。

製造販売元

セレクト株式会社

〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町19-10
Tel. (06) 6765-0691(代) Fax. (06) 6765-0690

2107/yag/har